

REGENFLEX STARTER® KISA ÜRÜN BİLGİSİ

İÇERİK:

32 mg Serbest bağlı / 800 – 1200 K Dalton Hyaluronik asit, sodyum tuzu, Sodyum klorür, fosfat tampon, 2 ml enjeksiyon için su

FORM:

32 mg / 2 ml, Kullanıma hazır şiringa

KULLANIM YERİ:

Sinoviyal sıvı yerine geçer ve dejeneratif veya travma sonrası oluşan patolojilerden kaynaklanan ağrı veya hareket kabiliyetinin azalmış olduğu durumlarda etkilenmiş olan eklemlere fizyolojik ve reolojik özelliklerini yeniden kazandırır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Enjekte edilmeden önce artiküler efüzyonun tamamı aspire edilmelidir. Enjektörün kapağını, açık kalacak olan ucun herhangi bir yere temas etmemesine dikkat ederek çıkarın. Uygun bir enjektör iğnesini(18-22 G), enjektörün hava geçirmez olmasını sağlamak ve çözeltinin sızmasını önlemek amacıyla çevirerek, sıkı bir şekilde enjektöre takılır.

Önerilen uygulama protokolü; Bir hafta arayla 2 veya 3 kez, 2 ml / 32 mg uygulanır. REGENFLEX STARTER® enjeksiyonundan önce, eklem alanındaki olası birikimlere aspirasyon uygulanır.

Oda sıcaklığında ve tam asepsi şartlarında, yalnızca sinoviyal boşluğa enjekte edilir.

ÜRÜN STATÜSÜ

Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Kurumu onaylı / ÜTS (Ürün takip sistemi) kaydı / Medical device / CE Belgeli

FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

İntrafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Barış Mah. Belediye Cd. Kavaklıdere Mevkii Ginza Lavinya Park Sitesi, B Blok, No:89

Beylikdüzü - İstanbul

Telefon 0212 4385760

Web: www.intrafarma.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Regenyal Laboratories / İtalya

RAF ÖMRÜ

2 Yıl

BARKOD: 8681065100076

Meşe Ülke: İtalya